

FLACON OCULAIRE - RECHARGE



Fabrication européenne



Caractéristiques

- o Flacon de 250 ml de sérum physiologique stérile
- o Permet de recharger la [station oculaire murale](#)
- o Destiné aux rinçages des yeux en cas de projections de particules solides
- o Flacon muni d'ocillère ergonomique

Avantages

Le sérum physiologique stérile est un liquide doux et sûr qui est **utilisé pour rincer les yeux en cas d'irritation ou de contamination par des substances irritantes**. Il est parfaitement adapté pour apaiser les yeux en cas de contact avec des épices, des oignons ou d'autres ingrédients potentiellement irritants et il est particulièrement recommandé lors de projections d'éléments solides (poussière, sciure...)

La recharge de 250 ml permet d'avoir une quantité suffisante de sérum physiologique à disposition, ce qui est important dans un environnement de cuisine où les accidents peuvent se produire rapidement. L'ocillère ergonomique facilite l'application du sérum physiologique en maintenant l'œil ouvert et en permettant un rinçage efficace et précis. La stérilité du sérum physiologique garantit un rinçage sûr et hygiénique, réduisant ainsi les risques d'infection ou de contamination croisée dans la cuisine professionnelle.

Le flacon comporte une étiquette avec le mode d'utilisation schématisé, ce qui facilite son utilisation.

Bénéfices

En utilisant cette recharge de flacon oculaire, vous pouvez rapidement soulager les irritations oculaires sans avoir à vous rendre à la pharmacie ou à contacter un professionnel de la santé. Cela vous permet de gagner du temps et de continuer à travailler sans interruption, tout en protégeant votre personnel.

Conseils d'utilisation

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles

Version : 06-25 - Date : 03/03/2026

Réf. : HA4250OC

EAN : 8034028011504

1. Préparation : Avant utilisation, vérifiez la date de péremption du sérum physiologique et assurez-vous que le flacon est scellé et stérile.
2. Hygiène : [Lavez-vous soigneusement les mains](#) avec du savon avant de manipuler le flacon et l'ocillère. Veillez à ne pas toucher l'embout du flacon avec vos mains ou toute autre surface pour maintenir la stérilité.
3. Utilisation : Placez l'ocillère ergonomique sur l'œil affecté et maintenez doucement l'œil ouvert en utilisant l'ocillère. Tenez le flacon à une distance appropriée et pressez légèrement pour administrer le sérum physiologique en un flux doux et continu.
4. Rinçage : Assurez-vous que le sérum physiologique atteigne tous les coins de l'œil pour un rinçage complet. Inclinez légèrement la tête du côté de l'œil affecté pour faciliter le rinçage. Si nécessaire, vous pouvez répéter le processus pour éliminer toute substance irritante résiduelle.
5. Il est important de noter que si l'irritation oculaire persiste ou s'aggrave, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour un avis médical approprié.
6. Ce flacon oculaire est à usage unique : il doit être jeté après utilisation.

Dimensions et poids du produit

- Hauteur nette (mm) : 255
- Diamètre net (mm) : 50
- Poids net (kg) : 0,321

Caractéristiques détaillées

- DLU MAX Fabrication : 30M
- DLU minimum garantie à la livraison client final : 12M
- Code douanier : 25010099
- Unité de base : FLACON

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles