

FLACON OCULAIRE 250 ML AVEC SUPPORT



Fabrication européenne



Caractéristiques

- Flacon de sérum physiologique avec support
- Contenance : 250 ml
- Destiné aux rinçages des yeux en cas de projections de particules solides
- Oeillère ergonomique protégée de la poussière grâce au couvercle de protection
- Fourni avec une signalétique "lave œil" et son grippeur autocollant

Comment fixer le support au mur ?

- Avec des vis inox et chevilles (fournies) - fixation 2 points
- En option : 1 [bande adhésive déjà posée](#) à ajouter à votre panier
- En option : avec 2 aimants ([à poser vous-même](#) ou [déjà posés](#)) à ajouter à votre panier

Avantages

- **Rapidité d'intervention** : En cas de projection d'un produit chimique ou d'un ingrédient irritant dans les yeux, il est crucial d'agir rapidement pour minimiser les dommages potentiels. Cette version avec support, permet une installation du flacon aux endroits stratégiques, simplifiant l'accès immédiate pour une intervention plus rapide. Le produit est facile à appliquer grâce au mode d'emploi schématisé sur le flacon. Il vous suffit de saisir le flacon et de le diriger vers les yeux affectés.
- **Rinçage contrôlé** : Le flacon oculaire est conçu pour fournir un rinçage précis et contrôlé. Il est équipé d'une buse qui délivre un jet doux et régulier de solution de rinçage. Cela permet de nettoyer efficacement les yeux sans provoquer de traumatismes supplémentaires.
- **Maintien des paupières ouvertes** : Ce flacon oculaire est doté d'une oeillère ergonomique pour maintenir les paupières ouvertes pendant le rinçage. Cela permet d'assurer un rinçage complet en évitant que les paupières ne se referment involontairement. C'est particulièrement utile en cas de projection de particules solides ou de substances adhésives qui pourraient rester piégées entre les paupières.
- **Stérilité et hygiène** : Les flacons oculaires avec support sont conçus pour préserver la stérilité de la solution de rinçage. Ils sont équipés d'un bouchon hermétique qui empêche la contamination de la solution par des micro-organismes ou des contaminants extérieurs. Cela garantit que la solution de rinçage est propre et sûre à

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles

utiliser, ce qui est essentiel pour protéger les yeux contre les infections.

Bénéfices

En ayant un flacon oculaire avec support bien visible et facilement accessible dans la cuisine professionnelle, vous favorisez l'adoption rapide des mesures de sécurité.

Cela vous permet d'agir rapidement et efficacement en cas de projection dans les yeux, en assurant un rinçage précis, hygiénique et sécurisé.

L'utilisation de ce produit favorise la sécurité des membres du personnel et renforce la culture de sécurité au sein de la brigade.

Conseils d'utilisation

Avant utilisation, il est essentiel de vérifier la date de péremption du sérum physiologique et de s'assurer que le flacon est scellé et stérile.

L'hygiène est primordiale : il convient de [se laver soigneusement les mains](#) avec du savon avant de manipuler le flacon et l'ocillère. Il est important de ne pas toucher l'embout du flacon avec les mains ou toute autre surface afin de préserver la stérilité.

Pour l'utilisation, placez délicatement l'ocillère ergonomique sur l'œil affecté et maintenez l'œil ouvert en utilisant l'ocillère. Maintenez le flacon à une distance appropriée et exercez une légère pression pour administrer le sérum physiologique en un flux doux et continu.

Assurez-vous que le sérum physiologique atteigne tous les recoins de l'œil afin d'effectuer un rinçage complet.

Légèrement incliner la tête du côté de l'œil affecté peut faciliter le rinçage. Si nécessaire, le processus peut être répété pour éliminer toute substance irritante résiduelle.

Il est important de noter que si l'irritation oculaire persiste ou s'aggrave, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un avis médical approprié.

Le flacon est à usage unique, il doit être jeté après utilisation.

Une fois utilisé, vous pouvez installer une [nouvelle recharge](#) sur le support.

Dimensions et poids du produit

- Longueur nette (mm) : 65
- Largeur / profondeur nette (mm) : 60
- Hauteur nette (mm) : 260
- Poids net (kg) : 0,365

Caractéristiques détaillées

- DLU MAX Fabrication : 36M
- DLU minimum garantie à la livraison client final : 12M
- Code douanier : 25010099
- Unité de base : UN

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles



Version : 06-25 - Date : 03/03/2026
Réf. : HA4725OC

Visuels



Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles

SANIPOUSSE - 15 rue Copernic - 41260 La Chaussée St Victor
Tél. 02 54 43 75 75 - contact@sanipousse.com - www.sanipousse.com - shop.sanipousse.com